

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

GC EXAFLEX

ДЖИ СИ ЭКЗАФЛЕКС

Поливинилсилоксановый слепочный материал

Поливинилсилоксановый слепочный материал нормальной вязкости (голубой) и жидкотекучий (розовый) для изготовления монофазных, двойных и многослойных слепков. Обладает пространственной устойчивостью, высокой эластичностью, способностью восстанавливать форму после деформации. Прекрасная адгезия ко всем слепочным материалам семейства ДЖИ СИ Экзафлекс / Экзамикс. Тиксотропические и гидрофильные свойства позволяют с высочайшей точностью прояснять мельчайшие детали.

Область применения

ПРИМЕНЕНИЕ	ТИП СЛЕПКА	ТИП СЛЕПОЧНОЙ ЛОЖКИ	ТИП МАТЕРИАЛА
СЛЕПОК ОТПРЕПАРИРОВАННОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВИНИРОВ, ВКЛАДОК, НАКЛАДОК И Т.Д.	ДВУХСЛОЙНЫЙ СЛЕПОК	ПРИПАСОВОЧНАЯ ИЛИ СТАНДАРТНАЯ СЛЕПОЧНАЯ ЛОЖКА	ЭКЗАФЛЕКС ПАТТИ + ЭКЗАФЛЕКС НОРМАЛЬНЫЙ ИЛИ ЖИДКОТЕКУЧИЙ
СЛЕПОК ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ПОД КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ	МНОГОСЛОЙНЫЙ СЛЕПОК	СТАНДАРТНАЯ СЛЕПОЧНАЯ ЛОЖКА	ЭКЗАФЛЕКС ПАТТИ + ЭКЗАФЛЕКС НОРМАЛЬНЫЙ ИЛИ ЖИДКОТЕКУЧИЙ
СЛЕПОК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ	МНОГОСЛОЙНЫЙ СЛЕПОК	СТАНДАРТНАЯ СЛЕПОЧНАЯ ЛОЖКА	ЭКЗАФЛЕКС ПАТТИ + ЭКЗАФЛЕКС ЖИДКОТЕКУЧИЙ ИЛИ НОРМАЛЬНЫЙ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ЭКЗАФЛЕКС нормальный	ЭКЗАФЛЕКС жидкотекучий
ВРЕМЯ ЗАМЕШИВАНИЯ (СЕК)	30 СЕКУНД	30 СЕКУНД
МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ	1 ' 45"	2' 15"
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ при 23 ⁰ С	4 МИНУТЫ	4 МИНУТЫ
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА	4 МИНУТЫ	4 МИНУТЫ

ЭТАПЫ РАБОТЫ.

1. Перед замешиванием ЭКЗАФЛЕКС тщательно вымыть руки (или надеть полиэтиленовые перчатки).
2. Выдавить одинаковые объёмы паст базы и катализатора. Замешивать 30 секунд до получения массы однородного цвета.
3. Распределить замешанный материал в слепочную ложку или на ранее изготовленный базовый слой из ЭКЗАФЛЕКС ПАТТИ и ввести ложку в полость рта.
4. Не ранее, чем через 4 минуты вывести изо рта.
5. Оценить слепок, удалить излишки материала.
6. Слепок может быть очищен и продезинфицирован в течение 20 минут 2,5% или 3,4% растворе глютаральдегида.

ПРИМЕЧАНИЕ!

1. При замешивании ЭКЗАФЛЕКС нужно избегать контакта с материалами и веществами, которые могут повлиять на отверждение.
 - Катализаторы силиконовых материалов
 - Полисульфидные слепочные материалы
 - Евгенол содержащие материалы
2. Хранить тубы с ЭКЗАФЛЕКС базой и катализатором плотно закрытыми и не допускать смешивания материалов.
3. Хранить в прохладном сухом месте.
4. Не применять ЭКЗАФЛЕКС у пациентов с аллергическими реакциями на СИЛИКОНОВЫЕ материалы.
5. Избегать попадания замешанных силиконовых материалов на ткани (одежду), т.к. они трудно удаляются.