

Sultan®

Профессиональные и Индивидуальные Средства Гигиены и Профилактики

SultanHealthcareInc.

Sultan®

Что такое фторид?

Фторид - это токсичный неустойчивый ион, существующий в природе в виде различных соединений, например, фосфата фтора или фтористого натрия.

Фторид в стоматологии:

Использование фторида для предотвращения кариеса основано как на общем, так и на местном его действии. Профилактическое (общее) и лечебное (локальное) благоприятное действие фторида очевидно из обширных исследований и клинической практики.

Как фторид помогает предотвратить кариес?

- Уменьшением разрушения эмали
- Реминерализацией зубов
- Препятствием для возникновения микробов, вызывающих кариес
- Изменением структуры зубов, например, уменьшением образования микротрещин

Sultan®

Местное применение фторидсодержащих препаратов SULTAN в виде APF 1.23%

1. Пациенты, страдающие ксеростомией
2. Ортодонтические больные
3. Пациенты те, чей рацион питания кариесогенен
4. Пациенты, не соблюдающие гигиенические процедуры для полости рта
 - идеальные кандидаты для применения фторида, так как они обычно считаются принадлежащими к группе большого риска возникновения кариеса.
5. Пациенты, для которых угроза кариеса мала, также могут извлечь пользу из местного применения фторида благодаря его способности:
 - ослаблять формирование кислых составляющих в зубном налете;
 - снижать прилипание налета;
 - менять состав микрофлоры налета, предотвращая, таким образом, появление участков, пораженных кариесом. Кариес может предотвращаться механическим удалением бактерий, однако, для таких больных лучше всего подходит программа, в которой сочетаются фторидная терапия и усиленное поддержание гигиены полости рта

Клиническое применение фторидсодержащих препаратов SULTAN в виде APF 1.23%

ТОЛЬКО 1 МИНУТА!

Доказано, что основное проникновение фторида в эмаль при использовании геля или пены на основе APF 1,23 % происходит в ПЕРВУЮ минуту нанесения.

Sultan®

ФТОРИДОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ SULTAN В ВИДЕ APF 1.23%

ТОРЕХ® " 00 : 60" SECOND Sultan (США)
Профилактический аппликационный
однородный тиксотропный гель

Состав:

Содержит 1,23 % APF - фторид натрия, подкисленный фосфорной кислотой. Вкусы: Вишни, Мята, Пина-Колады, Жевательной резинки, Апельсина.

Объем - 480 мл.

Показания:

Фторидная терапия применяется в целях предупреждения разрушения зубов, для реминерализации повреждений в начальной стадии, снижения повышенной дентинной чувствительности и уменьшения нарастания зубного налета.

Рекомендуется использовать детям, начиная с 6 лет:

- с целью профилактики 2 процедуры в год
- при предрасположенности к кариесу и для снижения чувствительности зубов. 1 процедура 4 раза в год
- при интенсивном кариозном процессе 10 ежедневных процедур 2 раза в год, затем регулярная профилактика.

Способ применения:

Аппликационную ложку наполнить гелем не более, чем на 1/3. Тщательно просушить поверхность зубов и разместить ложку на зубах на 60 СЕКУНД! Небольшие жевательные движения позволяют добиться равномерного покрытия интерпроксимальных поверхностей. После процедуры удалить ложку и остатки геля. Не полоскать рот, не пить и не есть в течении 30 минут. Один флакон геля рассчитан на 70-90 пациентов взрослых и на 100-120 пациентов детей.



Sultan®

Состав:

Содержит 1,23 % APF - фторид натрия, подкисленная фосфорной кислотой. Вкусы: Вишни, Мята, Пина-Колады, Жевательной резинки.

Объем - 125 г.

Показания:

Предназначена для профессионального применения. Фтористые соединения оказывают активное воздействие на эмаль зубов, которые характеризуются трансформацией ее кристаллической структуры (увеличивают пенетрацию флюоридных ионов в эмаль зуба) благодаря пористому составу пена лучше проникает в межзубные промежутки. Состав этой пены подавляет рост бактерий, что способствует снижению уровня образования зубного налета, а так же повышает резистентность эмали к воздействию неблагоприятных кариесогенных факторов.

Рекомендуется использовать детям, начиная с 6 лет:

- с целью профилактики 2 процедуры в год
- при предрасположенности к кариесу и для снижения чувствительности зубов. 1 процедура 4 раза в год
- при интенсивном кариозном процессе 10 ежедневных процедур 2 раза в год, затем регулярная профилактика.

Способ применения:

Аппликационную ложку наполнить пеной не более, чем на 1/3. Тщательно просушить поверхность зубов и разместить ложку на зубах на 60 СЕКУНД! Небольшие жевательные движения позволяют добиться равномерного покрытия интерпроксимальных поверхностей. После процедуры удалить ложку и остатки пены. Не полоскать рот, не пить и не есть в течении 30 минут. Один флакон пены рассчитан на 40-60 пациентов взрослых и на 70-100 пациентов детей.



Sultan®

ТОРЕХ® Neutral pH Foam Sultan (США) Нейтральная фтористая пена

Состав:

Содержит 2% Фтористый натрий (0,9% ион фторида)
Нейтральный показатель pH(6,5 - 7,5).Вкус ягод.
Легкая воздушная пена
Четырехминутная формула

Объем - 125 г.

Показания:

- Идеальна для пациентов с: непереносимостью к кислотным фторидам, уменьшенным слюноотечением или косметической реставрацией
- Применяется после отбеливания
- Уменьшает рвотные движения и проглатывание, быстро очищается изо рта - не засоряет систему отсоса; обеспечивает отличное межзубное покрытие
- Предпочтительна для пациентов проходящих химиотерапию, радиотерапию или использующих медикаменты, вызывающие ксеростомию
- Увеличивается возможность применения для пациентов всех возрастов

Применение:

Аппликационную ложку наполнить пеной не более, чем на 1/3. Тщательно просушить поверхность зубов и разместить ложку на зубах на 4 МИНУТЫ!
Небольшие жевательные движения позволяют добиться равномерного покрытия интерпроксимальных поверхностей. После процедуры удалить ложку и остатки пены. Не полоскать рот, не пить и не есть в течении 30 минут. Один флакон пены рассчитан на 70-90 пациентов взрослых и на 100-120 пациентов детей.



Sultan®

TOPEX® Neutral pH Gel Sultan (США) Нейтральный показатель pH фтористого геля

Состав:

2% фтористый натрий (0,9% ион фторида)
Однородный, кремообразный и тиксотропный
Четырехминутная формула
Нейтральный показатель pH (6,5 - 7,5)
Вкусы: Пина-колады, Мята, Клубники - прозрачный

Объем - 480 г.

Показания:

- Уменьшает риск возобновления разъедания или потускнения
- Гель вкуса клубники - применяется после отбеливания
- Предпочтительно для пациентов проходящих химиотерапию, радиотерапию или применяющих лекарственные препараты, вызывающие ксеростомию
- Идеально для пациентов, которые не переносят кислые фториды, с уменьшенным слюноотделением, стеклонаполненными пломбами со смолами или косметическими пломбами

Способ применения:

Аппликационную ложку наполнить гелем не более, чем на 1/3. Тщательно просушить поверхность зубов и разместить ложку на зубах на 4 МИНУТЫ!
Небольшие жевательные движения позволяют добиться равномерного покрытия интерпроксимальных поверхностей. После процедуры удалить ложку и остатки геля. Не полоскать рот, не пить и не есть в течении 30 минут. Один флакон геля рассчитан на 70-90 пациентов взрослых и на 100-120 пациентов детей.



Sultan®

Ложки двухсторонние для профилактических гелей и пен Sultan (США)

Предназначены для индивидуального использования фторидсодержащих профилактических средств.

Соответствуют анатомической форме зубной дуги. Лучше садятся на зубной ряд. Имеют замок для фиксации ложки

Размеры: маленькие (желтый цвет), средние (белый цвет), большие (синий цвет)



Рекомендации производителя

- Объем геля или пены - 2 мл или 40% объема ложки
- Не помещать в ложку более 5 - 10 капель геля
- Использовать таймер
- Сажать больного прямо с наклоненной вперед головой
- На протяжении всей обработки фторидом использовать отсос
- Держать отсос включенным 30 секунд после процедуры и/или просить пациента освобождаться от слюны в течение примерно одной минуты
- Не оставлять ребенка без присмотра во время обработки фторидом
- Держать растворы фторидов в местах, не доступных для детей

Sultan®

**Клиническое применение
TOPEX® "00 : 60" SECOND Sultan (США)
TOPEX® Neutral pH Sultan (США)**

- Выбрать ложку соответствующего размера
- Аккуратно заполнить ложку гелем или пеной на 2/3 объема
- Вставить ложку в рот пациента
- Засечь время, согласно инструкции по применению препарата (Вставить между ложками слюноотсос, убедившись, что пациенту удобно(при этом методе для баланса прикуса с противоположных сторон могут потребоваться ватные валики))
- Убрать ложку изо рта пациента
- Попросить пациента сплюнуть немедленно после удаления ложки
- После процедуры, при необходимости удаления излишнего фторида, применять интенсивный отсос
- Предупредить пациента о том, что в течение 30 минут после процедуры нельзя есть или пить

Sultan®

Фторидсодержащие препараты SULTAN

для использования в домашних условиях

Stannous Fluoride Gel 0.4 % Sultan (США)

Лечебный гель на основе фтористого олова для домашнего использования

Состав:

Содержит 0,4 % фтористое олово
Густой прозрачный гель.

Вкусы: Ягод, Мята, Жевательной резинки

Объем: 122 г

Показания:

Препятствует кариесогенному микробному процессу; помогает реминерализации слабой эмали, чтобы предотвратить кариес; лечит гиперчувствительность. Идеален для пациентов, предрасположенных к кариесу, ортодонтических пациентов, после воздействия облучения и отбеливания.

Применение:

После чистки зубов обычной зубной пастой, прополоскать рот. Нанести на щетку небольшое количество геля. С помощью массажных движений щетки нанести гель по всем поверхностям зубов в течении 1 минуты.

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ ВОДОЙ! После применения сплунуть остатки геля. **РОТ НЕ ПОЛОСКАТЬ ВОДОЙ.** После процедуры воздержаться от еды и питья в течение 30-40 минут.



Sultan®

TOPEX® White Care® 1.1% Neutral Sodium Fluoride Sultan (США)
Лечебный гель широкого спектра для домашнего использования.

Состав:

1,1 % Нейтральный содийм флюорид. Содержит Ксилитол. Не содержит красителей. Вкус малины.

Объем: 56 г

Показания:

Идеальное средство после отбеливания.

Применяется для пациентов: страдающих ксеростомией (сухостью рта), хроническими заболеваниями, а также в период постоперационного восстановления. Мягко воздействует на мосты, коронки, пломбы. Take Home Care® - ослабляет формирование кислых составляющих в зубном налете, снижает прилипание налета и меняет состав микрофлоры налета, предотвращая, таким образом, появление участков, пораженных кариесом и предотвращает кариес на ранних стадиях. Снижает гиперчувствительность зубов после прохождения химиотерапии и отбеливающих процедур.

Применение:

Гель может использоваться вместо обычной зубной пасты. Каждый день чистите зубы в течение одной - двух минут с помощью мягких массажных движений.



Sultan®

TOPEX® Take Home Care 1.1% Neutral Sodium Fluoride Sultan (США) Лечебный гель широкого спектра для домашнего использования. Вкус мяты

Состав:

1,1 % Нейтральный фтористый натрий (0,5% ион фторида).
Содержит Ксилитол. Однородный гелевый состав

Объем: 56 г

Показания:

Останавливает развитие кариеса корня на ранней стадии, повторное разрушение коронки/края зуба и сильное разрушение зубов; идеален для пациентов с фарфоровыми зубами или непереносимостью кислого фторида из-за ксеростомии, булемии, облучения, общего заболевания, химиотерапии или обесцвечивания; мягкое действие на мосты, коронки и пломбы.

Применение:

Весь процесс состоит из одного действия; может использоваться вместо обычной зубной пасты (под руководством стоматолога)

- Увеличивает слюноотделение для облегчения восстановления зубов и поврежденной эмали и уменьшает развитие кариеса и образование пятен



Sultan®

Профессиональные профилактические пасты SULTAN

TOPEX® PROPHYLAXIS PASTE UNIDOSE 200 Sultan (США)

Профилактическая паста для проведения профессиональной гигиены в унидозах

Состав:

Содержит уникальную смесь полировочных и чистящих веществ. Содержание фтора в пасте в концентрации 1,23% ионов фторид натрия.

Степени абразивности:

мягкая, средняя, жесткая

Объем - 200 шт.

(ассорти: вкус Вишни, Мята, Пины Колады, Шоколада, Ванили, Клубники)

Показания:

Рекомендована для курильщиков и больных литиазом, который вызывает отложение зубного камня.

Содержание в пасте фтористых соединений повышает резистентность эмали к воздействию неблагоприятных кариесогенных факторов.

Паста может применяться для тонкого шлифования пломбированных зубов, что придает им блеск.

Способ применения:

Надеть держатель с кольцом на палец руки, вставить капю с пастой в кольцо, снять защитную пленку.

Штапелем взять необходимое количество пасты и нанести на циркулярную щеточку.

Каждая капя рассчитана на одно применение.



Sultan®

ТОРЕХ® PROPHYLAXIS PASTE 340 Sultan (США) Профилактическая паста для проведения профессиональной гигиены

Состав:

Содержит уникальную смесь полировочных и чистящих веществ. Содержание фтора в пасте в концентрации 1,23% ионов фторид натрия.

Объем - 340 г.

Показания:

Рекомендована для курильщиков и больных литиазом, который вызывает отложение зубного камня.

Содержание в пасте фтористых соединений повышает резистентность эмали к воздействию неблагоприятных кариесогенных факторов.

Паста может применяться для тонкого шлифования пломбированных зубов, что придает им блеск.

Способ применения:

Открыть банку, снять защитную пленку, но не удалять (пленка предохраняет пасту от высыхания). Штапелем взять необходимое количество пасты и нанести на циркулярную щеточку.

После работы плотно закрыть крышкой банку с пастой.



Sultan®

ТОРЕХ® DuraShield Sultan (США) Лак с 5% содержанием фтористого натрия

Характеристика

Одноразовый гигиенически запечатанный пакет
 Готовая смесь содержит 40мл лака с 5% содержанием фтористого натрия
 Включает щетинную щетку Ультрабраш 2.0
 Светлый янтарно-желтый оттенок
 Приятный вкус
 Подслащен натуральным ксилитом
 Входит в контакт со слюной и сохраняется до 8 часов
 Минимальные ограничения в еде/питье после применения
 Компактная картонная коробочка с отверстием для постепенного высыпания содержимого
 Включает двуязычную инструкцию для пациента
 Более экономный по сравнению с другими марками



Sultan®

Преимущества

Помощь в асептическом контроле; исключает риск вторичного загрязнения
Не требует измерений; обеспечивает постоянный уровень фторида при каждом применении
Для удобного, правильного применения
Увеличивает визуальный контроль
Приятен и хорошо принимается пациентами всех возрастов
Помогает уменьшить разрушение зуба, препятствует формированию пятен; не оставляет неприятного послевкуся
Увеличивает поглощение фторидов
Увеличивает восприимчивость пациента
Удобен в хранении и дозировке
Помогает в соблюдении больным режима и схемы лечения после применения
Экономит ваше время и деньги

Применение фторосодержащего лака

Используйте детскую зубную щетку и быстро почистите зубы ребенка
Протрите зубы тампоном размером 2 X 2 и нанесите фторосодержащий лак при помощи одноразовой щетки на всю поверхность зубов
Продолжайте "протирать и наносить лак" до тех пор пока не обработаете все зубы. Лак вступит в контакт со слюной
Следует помнить, что лак имеет желтоватый цвет и может быть видимым в течение нескольких часов. Не следует применять щетку до следующего дня, чтобы сохранить лаковое покрытие как можно дольше
Фторосодержащий лак должен применяться каждые два или три месяца у детей имеющих риск возникновения кариеса

Sultan®

ТОРЕХ® PREP® POLISH PASTE UNIDOSE 100 Sultan (США) Профилактическая полировочная паста

Состав:

не содержит: фтор, масел, вкуса

Объем - 100 шт.

Показания:

паста применяется перед пломбированием, ортодонтическими процедурами, отбеливанием.

Способ применения:

Надеть держатель с кольцом на палец руки, вставить капку с пастой в кольцо, снять защитную пленку. Штапелем взять необходимое количество пасты и нанести на циркулярную щеточку.

Каждая капка рассчитана на одно применение.



Sultan®

TOPICAL ANESTHIC SPRAY Sultan (США) Спрей для местной анестезии

Состав:

Содержит 20 % раствор бензокаина, что обеспечивает быстрое действие, без абсорбции мягкими тканями, отсутствие специфического горького вкуса как во время, так и после лечения. Спрей обладает приятным вкусом вишни.

Объем - 60 мл.

Показания:

Применяется перед инъекционной анестезией, во время ретракции десны, для снятия рвотного рефлекса.

Состав спрея TOPICAL ANESTHIC SPRAY полностью выводится из организма, не имеет побочных явлений, поэтому может быть использован в качестве болеутоляющего средства для детей любого возраста.

Способ применения:

Направленной струей с помощью пластиковой трубочки нанесите состав на слизистую поверхность десны. Спрей действует практически сразу. Продолжительность действия 2-3 минуты.



Sultan®

TOPICAL ANESTHETIC GEL Sultan (США) Гель для местной анестезии

Состав:

Содержит 20 % раствор бензокаина, что обеспечивает быстрое действие, без абсорбции мягкими тканями отсутствие специфического горького вкуса как во время, так и после лечения. Возможные вкусы: вишни, жевательной резинки, клубники.

Объем - 30 мл.

Показания:

Применяется перед инъекционной анестезией, во время ретракции десны, для снятия рвотного рефлекса. Состав геля полностью выводится из организма, не имеет побочных явлений, поэтому может быть использован в качестве болеутоляющего средства для детей любого возраста.

Способ применения:

С помощью микрощеточки нанесите гель на слизистую поверхность десны. Гель действует практически сразу. Продолжительность действия 2-3 минуты.

LIQUID DISPENSER (White) Sultan (США) Диспенсер (контейнер) для жидкости-анестетика.

Применение

Вскройте флакон с анестетиком, зафиксируйте на флаконе диспенсер и переверните на 180°. Используйте ватные палочки, по окончании работы, закройте диспенсер.



Sultan®

HEMOVAN Sultan (США)

Капиллярное кровоостанавливающее средство
для ретракции десны и остановки кровотечений в канале

Состав:

Содержит хлористый алюминий.

Объем - 30 мл.

Показания:

При инфильтрации крови из десны в пришеечной области зуба, апикальном кровотечении, ретракции десны перед снятием слепков, слабом десневом кровотечении.

Способ применения:

В том случае, если необходимо остановить кровотечение из десен, можно использовать раствор жидкости НЕМОВАН для тампонирования, либо использовать в качестве пропитки для ретракционных нитей.

Disclosin Solution Sultan (США)

индикатор для определения зубного налета (концентрат).

Состав:


Содержит хлористый алюминий.

Объем - 60 мл.

Способ применения:

Приготовить раствор: 10 капель индикатора на 30 мл воды.

Прополоскать рот. Не глотать! Окрашенные участки указывают на наличие бактериального налета. Провести дополнительную очистку проблемных зон.

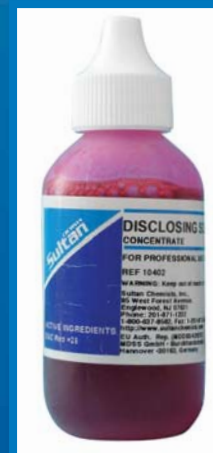

Sultan®

Расчет себестоимости процедур вторичной терапии, полировки и шлифования

Для процедуры профилактики и лечения необходимо:

- **Бутылка TOPEX "00 : 60" SECOND GEL**

1 x 795р.

(480 мл на 90-100 пациентов)

- **Двойные ложки Dual Arch Trays**
2 x 945р.

(50 ложек в упаковке)

ИТОГО 2685р.

Себестоимость процедуры - 26,85р.



Для процедуры полировки и шлифования необходимо:

- **Упаковка TOPEX PROPHYLAXIS UNIDOSE**

1 x 1200р.

(200 шт. на 200 пациентов)

ИТОГО 1200р.


Себестоимость процедуры - 6р.



Sultan®

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Фторидная терапия считается важным методом лечения в целях предупреждения разрушения зубов, для реминерализации повреждений в начальной стадии, снижения повышенной дентинной чувствительности и уменьшения нарастания зубного налета. Хотя фториды и оказывают благотворное воздействие на стоматологических больных по целому ряду направлений, оптимальные результаты лечения могут быть достигнуты сочетанием многих факторов, таких, как обучение правилам гигиены полости рта, советы по правильному питанию, всеобъемлющие планы восстановления, диагностики и лечения зубов, в дополнение к индивидуализированным методам обработки фторидами.

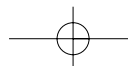

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A large rectangular area with horizontal blue lines, intended for notes. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page's content area.



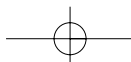

Sultan®

