

GC Reline

ПЛАСТМАССА ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ПЕРЕБАЗИРОВКИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ЗА ОДИН ПРИЕМ

Для использования только профессиональными стоматологами и только соответственно показаниям.

ПОКАЗАНИЯ

GC RELINE – пластмасса, используемая для перебазировки съемных протезов без участия техника. Жидкость, входящая в его состав, не содержит метилметакрилата, что уменьшает неприятный запах и раздражение десневых тканей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказан пациентам, имеющим чувствительность к метакрилату. При появлении аллергических реакций, обратитесь к врачу соответствующей специализации.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Загрубите поверхности протеза, подлежащие перебазировке. Тщательно очистите и просушите протез.
2. Используя ватный тампон, покройте искусственные зубы, язычную и щечную поверхности протеза вазелином или смазкой COE. Не покрывайте смазкой наружную кромку протеза шириной 3 мм (1/ 8 дюйма). В случае протезов с пластмассовыми зубами, нанесите на них смазку COE, чтобы предотвратить прилипание GC RELINE.
3. С помощью прилагаемой щеточки нанесите BONDING AGENT на поверхности протеза, подлежащие перебазировке. Просушите воздухом в течение приблизительно 10 секунд.

Замечание:

BONDING AGENT – летучее вещество, , после его использования плотно закрывайте крышку.

4. Нормальная вязкость получается при смешивании 1.8 г порошка и 1 мл жидкости, что соответствует основным делениям шкалы на пузырьке с порошком и на пипетке. Накапайте жидкость, затем высыпьте порошок в резиновую чашку и осторожно перемешайте в течение 15 секунд.
5. Ровно нанесите пластиковым шпателем смесь на поверхности протеза, контактирующие с мягкими тканями.
6. Приблизительно через 1 минуту после начала замешивания вставьте протез в рот пациенту. Дайте пациенту слегка накусить. При необходимости сбалансируйте пальцами протез.
7. Для перебазировки полного протеза без поднутрений:
Удалите избыток пластмассы неизвлекая протез изо рта пациента. До затвердевания материала (приблизительно 5.5 минут от начала замешивания) держите протез во рту.
8. Для перебазировки полного протеза с поднутрениями или частичного протеза:
Извлеките протез, когда материал достигнет резиноподобного состояния (приблизительно 2 - 2.5 минуты от начала замешивания) . Удалите излишки и опять поместите протез в рот пациенту до того, как пластмасса начнет разогреваться. Если по каким либо причинам протез нельзя повторно поместить в рот пациента, то положите протез в теплую воду (приблизительно 40 -50 °C) на 3 минуты до полного затвердевания.

Замечание :

При наличии поднутрений или зон ретенции протез должен быть извлечен изо рта, пока материал имеет резиноподобную консистенцию и не начал разогреваться. В противном случае извлечение протеза может оказаться затруднительным.

9. Для расширения краев протеза: Замешайте материал чуть более густым, чем предписывается стандартным соотношением.

10. Извлеките протез изо рта приблизительно через 5.5 минут от начала замешивания.

Произведите финишную обработку и полировку протеза обычным образом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Жидкость для замешивания и BONDING AGENT – летучие и огнеопасные жидкости, держите их вдали от открытых источников пламени.

2. После нанесения BONDING AGENT, промойте кисточку жидкостью GC RELINE или этиловым спиртом.

3. Перед использованием слегка встряхивайте бутылочку с порошком.

4. При попадании на кожу тщательно промойте водой.

5. При попадании в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь за медицинской помощью.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните при нормальной температуре 15 - 25 °С. (Срок годности – 3 года) .

УПАКОВКА

Порошок 80 г

Жидкость 50 мл (50 г)

BONDING AGENT 15 г

Чашка для замешивания

Дозатор порошка

Дозатор жидкости