

BEYOND ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТБЕЛИВАНИЯ

Система отбеливания, состоящая из лампы-акселератора и набора для отбеливания, работает комплексно, эффективно окисляя пигментацию, как на зубной эмали, так и проникая в дентин. Специальная формула отбеливающего геля, разработанная для активации источником холодного света высокой интенсивности (длина волны 480 - 520 нанометров), служит для быстрого удаления многолетнего потемнения эмали только за одну 30-минутную процедуру. Специальные компоненты отбеливающего геля способствуют безукоризненной белизне и блеску ваших зубов. Процедура удобна, безопасна и эффективна при среднем показателе изменения цвета, более чем на 8 оттенков. При этом способе отбеливания, основанном на последних технических достижениях, не редкостью является улучшение цвета зубной эмали от 10 до 14 оттенков.

В комплекте с каждой Системой отбеливания Beyond Whitening System предоставляется маркетинговый пакет, который включает рекламные буклеты для пациентов, информационный DVD-диск, каталог фотографий для сравнения "до и после процедуры", демонстрационный стенд с двухметровым баннером и настенные плакаты для стоматологического кабинета.

ОСОБЕННОСТИ BEYOND POWER WHITENING SYSTEM:

- мощная галогеновая лампа, излучающая поток холодного света, проходящего через 12000 оптических волокон и активирующая процесс отбеливания;
- современные светофильтрующие линзы из 30 защитных слоев, пропускающие волны только определенной длины - 480-520 нанометров с нулевым ультрафиолетовым (UV) или инфракрасным излучением;
- время полной процедуры - только 30 минут со средним изменением оттенка зубной эмали на 10-14 тонов по шкале VITA;
- простая и быстрая подготовка пациента;
- удобная работа системы с цифровым таймером на дисплее;
- гарантийный срок – 3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Система для профессионального отбеливания зубов состоит из лампы и наборов расходных материалов:

1). Beyond Whitening Accelerator

- лампа-акселератор для профессионального отбеливания-1
 - запасная галогеновая лампа -1
 - защитные очки-2
 - информационные буклеты для пациентов – 100
 - настенные плакаты-2
 - демонстрационный DVD-диск
 - каталог фотографий «до и после» процедуры
 - инструкция по применению
- * Наборы материалов для отбеливания в этот комплект не входят

2). Beyond Single-Patient Treatment kit – стартовый набор для одного пациента

- инструкция по применению
- инструкция по уходу после
- шприц отбеливающего геля (35% H₂O₂) и смесительная насадка

- шприц материала для изоляции десны (1мл)
- полировочный порошок (1,2г)
- щечный ретрактор
- защитная салфетка для лица
- ватные валики
- защитный крем для губ (1г)
- жидкость H₂O₂ (2.0 cc), порошок катализатор (650мг), кисточка для нанесения и шпатель для смешивания
- насадка для удаления геля и пасты
- флюорид-гель для снятия чувствительности (1,5 мл)
- отбеливающая зубная паста

3). Beyond Five-Patient Economy kit – стартовый набор на 5 пациентов

- инструкция по применению
- 5 шприцев отбеливающего геля (35% H₂O₂) и смешительные насадки
- 5 шприцев материала для изоляции десны (1мл)
- 5 баночек флюорид-геля для снятия чувствительности (1,5 мл)
- 5 салфеток

4). BEYOND MAX5 PATIENT KIT - экономичный набор на 5 пациентов

- инструкция по применению
- 5 шприцев отбеливающего геля (35% H₂O₂) и смешительная насадка
- 5 шприцев материала для изоляции десны (1мл)
- 5 салфеток

5). BEYOND MAX10 PATIENT KIT - экономичный набор на 10 пациентов

- инструкция по применению
- 10 шприцев отбеливающего геля (35% H₂O₂) и смешительная насадка
- 10 шприцев материала для изоляции десны (1мл)
- 10 салфеток

ПРОЦЕДУРА ОТБЕЛИВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ЭТАП 1: Перед началом процедуры стоматолог должен провести осмотр полости рта и проконсультировать пациента в зависимости от его пожеланий и относительно плана лечения.

ПРОЦЕДУРА ОТБЕЛИВАНИЯ

ЭТАП 2: Нанесите пациенту защитный крем для губ и поставьте щечный ретрактор. Наденьте пациенту защитные очки

ЭТАП 3: Определите исходный оттенок зубов

ЭТАП 4: Вставьте ватные валики с двух сторон от уздечек верхней и нижней губы. Можно дополнительно нанести пациенту крем для губ на открытые мягкие ткани

ЭТАП 5: Просушить зубы и десны. Нанести «жидкий коффердам» - BEYOND® BlueSeal Gingival Protection по зубо-десневой границе и полимеризовать светом

ЭТАП 6: Присоедините смешивающую насадку к шприцу с отбеливающим гелем. Нанесите слой геля 2-3 мм на поверхность зубов, подлежащих отбеливанию

ЭТАП 7: Расположите лампу Beyond как можно ближе к ретрактору, убедитесь, что свет падает под углом 90° к поверхности зубов, нажмите кнопку «start» для запуска первого 10 минутного цикла отбеливания

ЭТАП 8: После окончания 10 мин. цикла свет выключится автоматически. Затем с помощью слюноотсоса удалите отбеливающий гель. Не смывайте водой. Повторите шаги 6-8 еще 2 раза по 10 минут.

ПОСЛЕ ОТБЕЛИВАНИЯ

ЭТАП 9: После завершения последнего цикла, удалите отбеливающий гель с помощью слюноотсоса. Удалите ватные валики и коффердам. Снимите ретрактор и защиту для глаз, затем прополощите зубы теплой водой.

ЭТАП 10: Продемонстрируйте пациенту его новый цвет зубов. Выдайте пациенту буклет с рекомендациями по поддержанию результатов отбеливания, а также пробный тюбик отбеливающей зубной пасты BEYOND® Pearl White toothpaste