

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

GC COE SOFT

ДЖИ СИ КОЕ СОФТ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ МЯГКОЙ ПЕРЕБАЗИРОВКИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ В УСЛОВИЯХ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИЕМА.

Показания: для мягкой временной перебазировки протезов из акриловых пластмасс на срок 3 – 6 месяцев.

Противопоказания: не применять у пациентов с аллергией к акрилатам.

Методика работы и клинические этапы:

1. Подготовка:

- a) Очистить внутреннюю поверхность протеза щеткой и водой, затем заглубить все подлежащие перебазировке и измененные в цвете участки как минимум на 2 мм.
- b) Нанести КОЕ ЛЮБРИКАНТ (изолятор) на поверхность зубов и внешнюю поверхность протеза, отступя 3 мм от края протеза. **КОЕ СОФТ** не соединяется с поверхностями, обработанными КОЕ ЛЮБРИКАНТ (изолятором).

2. Замешивание:

Стандартное соотношение порошок/ жидкость 11 г / 8,0 мл. Налейте необходимое количество жидкости в чашу для замешивания и медленно всыпьте порошок. Тщательно и деликатно перемешайте в течение 30 секунд, избегайте образования пузырьков воздуха.

3. Перебазировка:

- a) Через 30 секунд от начала замешивания нанести материал на внутреннюю поверхность протеза.
- b) Ввести протез в полость рта, установить в положении центральной окклюзии и через 3 минуты попросите пациента произвести функциональные движения.
- c) Аккуратно извлечь протез и обрезать избыток материала по периферии. Промыть под струей холодной воды и снова ввести в полость рта и попросить пациента плотно сомкнуть челюсти на 5 минут до окончательного отверждения. Снова вынуть протез и промыть водой.
- d) КОЕ СОФТ полностью полимеризуется через 9 минут от начала замешивания. Окончательная обработка проводится как обычно, неровные края заглаживаются разогретым шпателем.

4. Рекомендации пациенту:

Не применять абразивные вещества (в том числе и зубную пасту) и щетки для очищения поверхности протеза. Лучше всего промывать внутреннюю поверхность струей теплой проточной воды.

ХРАНЕНИЕ.

Хранение при температуре 4 – 25⁰ С.
(Срок годности - 3 года).