

Материалы стоматологические оттискные Replex
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12820 от 10 сентября 2012 г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Область применения

- Получение высокоточных оттисков для изготовления вкладок, искусственных коронок и мостовидных протезов.
- Функциональные оттиски.
- Регистрация окклюзии (*Replex Bite*).
- Гибкая десневая маска для изготовления мастер-моделей (*Replex Gingival Mask*).

Ёмкость картриджей **Replex Light Body, Light Body Extra, Medium Body, Heavy Body, For Denture, Penta Monophase, Heavy Body for Implant, Light Body for Implant, Light Body Fast, Heavy Body Fast, Light Body Fast, Light Body Long Bridge, Bite, Gingival Mask**

- Паста-основа: 25 мл, паста-катализатор: 25 мл (Итого 50 мл)

Ёмкость картриджей **Light Body mini, Bite mini**

- Паста-основа: 10 мл, паста-катализатор: 10 мл (Итого 20 мл):

Ёмкость картриджей **Heavy Body mini**

- Паста-основа: 15 мл, паста-катализатор: 15 мл (Итого 30 мл):

Ёмкость картриджей для однократного применения **Replex Secret Light Body I, Secret Light Body II**

- Паста-основа: 1.05 мл, паста-катализатор: 1.05 мл (итого 2,1 мл):

Ёмкость картриджей для автоматических смесителей 5:1 **Replex Penta Heavy Body, Penta Monophase**

- Паста-основа: 300 мл, паста-катализатор: 60 мл

Ёмкость упаковки **Replex Putti**

- Паста-основа: 300 мл (480 г), паста-катализатор: 300 мл (480 г), итого: 600 мл (960 г)

Физические свойства

- Время работы после смешивания: указано на упаковке
- Время отверждения после смешивания: указано на упаковке
- Твердость по Шору А: 45±2 (Light Body Long Bridge, Light Body Fast), 50±2 (Light Body for Implant), 68±2 (Heavy Body Fast), 68±2 (Penta Monophase)
- Контрастный цвет: паста-основа и паста-катализатор – разных цветов
- Воспроизведение деталей: 20,50,70 мкм - воспроизведение линии
- Совместимость с гипсом: 50,75 мкм - воспроизведение линии
- Упругое восстановление: до 99.8 %
- Деформация при сжатии: от 2 до 20 %
- Изменение линейного размера: 0.13~0.59 %
- Пропорции при смешивании пасты-основы и пасты-катализатора 1:1

Инструкция по использованию

1. Подготовка

- 1) Проверьте срок годности материала, удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки, проверьте соответствие цели использования.
- 2) Прочитайте руководство по использованию данного изделия.

Replex Light Body, Light Body Extra, Medium Body, Heavy Body, For Denture, Penta Monophase, Heavy Body for Implant, Light Body for Implant, Heavy Body Fast, Light Body Fast, Light Body Long Bridge, Bite, Gingival Mask

- 3) Снимите крышку, наденьте наконечник-смеситель.
- 4) Установите картридж с материалом в пистолет-диспенсер (1:1).

Replex Putty

- 3) Используйте мерные ложки. Соотношение пасты-основы и пасты-катализатора 1:1 (разного цвета!).

2. Руководство по использованию

Replex Light Body, Light Body Extra, Medium Body, Heavy Body, For Denture, Penta Monophase, Heavy Body for Implant, Light Body for Implant, Heavy Body Fast, Light Body Fast, Light Body Long Bridge, Secret Light Body I, Secret Light Body II

- 1) Чтобы обеспечить надёжную фиксацию оттискного материала в ложке, следует использовать адгезив.
- 2) Наклоните контейнер (картридж), чтобы обеспечить полное использование материала.
- 3) Промойте полость рта и удалите возможные загрязнения.
- 4) Внесите в ложку оттискной материал из наконечника-смесителя. Введите ложку в ротовую полость. Время отверждения оттискного материала составляет более 240 секунд, время на смешивание - 150 секунд.
- 5) Удалите отвердевший оттиск из полости рта.
- 6) Оттиск дезинфицируют стандартными растворами. Промойте, продезинфицируйте и высушите оттиск.
- 7) Удалите избыток оттискного материала.
- 8) Храните оттиск при комнатной температуре.

Replex Bite

- 1) Наклоните контейнер (картридж), чтобы обеспечить полное использование материала.

- 2) Промойте полость рта и удалите возможные загрязнения.
- 3) Нанесите материал для регистрации окклюзии на жевательную поверхность зубных рядов и попросите пациента сомкнуть зубы.
- 4) Дождитесь полного отверждения материала.
- 5) Извлеките отвердевший оттиск из полости рта.
- 6) Промойте, продезинфицируйте и высушите оттиск.
- 7) Храните оттиск при комнатной температуре.

Replex Gingival Mask

- 1) Наклоните контейнер (картридж), чтобы обеспечить полное использование материала.
- 2) Если Вам необходимо получить аналог-изображение десны, нанесите Gingival Mask на гипсовую модель.
- 3) Установите разделитель в оттиск зубов, полученный с гипсовой модели.
- 4) Поместите Gingival Mask в подготовленный оттиск.
- 5) Наложите оттиск с материалом на гипсовую модель и дождитесь отверждения.
- 6) Обрежьте полностью затвердевшую Gingival Mask с помощью фрезы или иного режущего инструмента.
- 7) Проверьте воспроизведение десны.

Replex Putty

- 1) Приготовьте одинаковое количество пасты-основы и пасты-катализатора. Равномерно перемешайте пальцами в течение не более 60 секунд (скорость отверждения зависит от температуры). Смешивание на ладони не допускается. Нельзя использовать латексные перчатки.
- 2) Заполните ложку. Если Вы выполняете оттиск одноэтапным методом, параллельно смешайте Light body и Putty и заполните ложку смесью.
- 3) Введите ложку в ротовую полость. Light body может застывать первым.
- 4) Подождите 4 минуты, по окончании этого времени проверьте твердость с помощью зонда.

Если на оттиске не остаётся следов от зонда, материал достаточно затвердел. После этого извлеките ложку с оттискным материалом и продуйте воздухом.

• Время смешивания: 49 секунд, время отверждения: 4 минуты (37° C) или более после смешивания

- 5) Промойте оттиск проточной водой, продезинфицируйте и высушите.
- 6) До отливки модели необходимо подождать 45 минут после выведения оттиска из полости рта. Следует учитывать уровень упругого восстановления. Рекомендуется использовать карбидный гипс. При использовании гипса следует учитывать расширение составов с низким содержанием карбида.
- 7) Остатки оттискного материала с губ и кожи пациента следует удалить сразу после извлечения оттиска. Промойте кожу водой.

Методика смешивания Replex Light Body, Light Body Extra, Medium Body, Heavy Body, For Denture, Penta Monophase, Heavy Body for Implant, Light Body for Implant, Heavy Body Fast, Light Body Fast, Light Body Long Bridge, Bite, Gingival Mask

- 1) Поверните колпачок контейнера (картриджа) против часовой стрелки.
- 2) Для приготовления смеси пасты и катализатора используйте наконечник-смеситель в соответствии с отверстием на контейнере (картридже).
- 3) Установите наконечник-смеситель и внесите оттискный материал в ложку.
- 4) Компоненты материала будут смешиваться автоматически.

3. Хранение: при комнатной температуре

4. Предосторожности при использовании

- 1) Продукт предназначен для использования профессиональными работниками здравоохранения, прошедшим специальную подготовку и ознакомленным с принципами его использования.
- 2) Не допускайте попадания на кожу и в глаза.
- 3) Не допускайте попадания в оттискной материал жидкости, содержащей полиэфир.
- 4) Данный материал следует использовать исключительно для получения оттисков в стоматологии, использование для других целей не допускается.
- 5) Не следует использовать данные материалы у пациентов с реакциями гиперчувствительности.
- 6) Не помещайте оттискной материал в жидкость и избегайте попадания на него органических жидкостей.
- 7) Не используйте материал с истекшим сроком годности.
- 8) Будьте осторожны, не допускайте попадания катализатора или основы на одежду врача или пациента.

Срок годности: 2 года

Свойства материала

При использовании по назначению материал соответствует требованиям стандартов ISO 4823, ISO 10993.