

## ИНСТРУКЦИЯ по применению пакетов бумажных самоклеящихся «СтериТ<sup>®</sup>» 154.093.2004 ИП

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пакеты бумажные самоклеящиеся для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации «СтериТ<sup>®</sup>» однократного применения (далее – пакеты) изготавливаются в соответствии с ТУ 9398-020-11764404-2004 и предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению. Пакеты представляют собой прямоугольный конверт с двумя склеенными боковыми и нижним швами (рис. 1 и рис.2). На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. На лицевой стороне пакета имеется химический индикатор 1 класса, позволяющий отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации, от не подвергавшихся.

В зависимости от марки используемой бумаги пакеты изготавливаются двух разновидностей:


- ПС-А - из бумаги мешочной;
- ПС-В – из бумаги упаковочной влагопрочной.

На пакеты нанесены один или несколько химических индикаторов паровой, воздушной, этиленоксидной, парформальдегидной или радиационной стерилизации.

Пакеты предназначены для упаковывания стерилизуемых медицинских изделий с целью сохранения их стерильности при хранении и транспортировании до использования по назначению.

Пакеты используются персоналом учреждений, предприятий и служб, осуществляющих стерилизацию медицинских изделий.


Пакеты изготавливают по 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 шт. в упаковке предприятия-изготовителя.

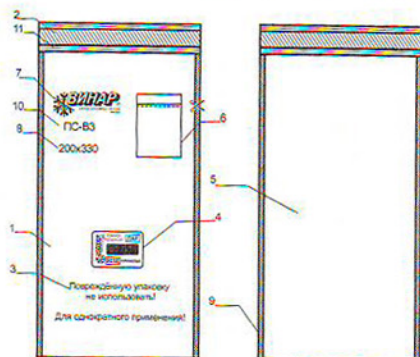

1. Лицевая сторона пакета
2. Клапан с самоклеящейся пленкой
3. Предупреждающая надпись
4. Индикаторы процесса I класса
5. Обратная сторона пакета
6. Образец вскрытия пакета
7. Товарный знак и/или наименование предприятия-производителя

8. Размер пакета
9. Боковые швы
10. Наименование изделия
11. Линия сгиба клапана
12. Сведения об однократности применения
13. Нижний шов

Рис.1. Эскиз внешнего вида пакета ПС-А3-1 и ПС-В3-1 (вариант 1).

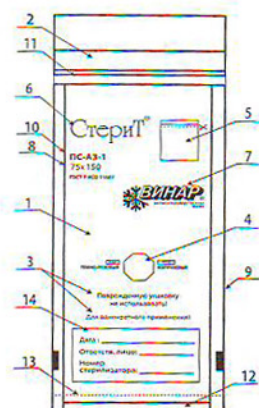

1. Лицевая сторона пакета
2. Клапан с самоклеящейся пленкой
3. Предупреждающая надпись
4. Индикаторы процесса I класса
5. Образец вскрытия пакета
6. Товарный знак
7. Логотип предприятия-производителя

8. Размер пакета
9. Боковые швы
10. Код
11. Линия сгиба клапана
12. Нижний шов
13. Нижний клапан
14. Место для записи

Рис.2. Эскиз внешнего вида пакета ПС-А3-1 и ПС-В3-1 (вариант 2).

На лицевой стороне пакета нанесены следующие обозначения:

- товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя;
- код изделия;
- размер пакета (ширина×длина, мм);
- запрещение использовать в случае повреждения пакета;