

Cavition

ВРЕМЕННЫЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

CAVITON – надежный материал для временных пломб, готовый к использованию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Легок в применении, поскольку нет необходимости в замешивании или разогревании.
2. По причине хорошей пластичности может вноситься в полость с применением легкого давления, не вызывает раздражения пульпы.
3. Не раздражает и не повреждает никакие ткани полости рта.
4. Затвердевает даже в результате кратковременного контакта со слюной. Особенно рекомендуется для временной обработки разрушенных молочных зубов.
5. Надежно запечатывает любые медикаменты, исключая подтекания. Легко удаляется экскаватором или другим острым инструментом.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Быстро просушите стенки полости ватным тампоном. Если стенки полости слишком влажные, CAVITON не прилипнет к ним. Просушивать воздухом не нужно.
2. Возьмите нужное количество препарата, внесите его в полость и немедленно после придания формы пломбе дайте пациенту закрыть рот, чтобы CAVITON смочился слюной. В случае полости на окклюзионной поверхности (класс I) , дайте пациенту прикусить, это удалит излишек материала, затем придайте форму пломбе.
3. CAVITON затвердевает снаружи вовнутрь в течение приблизительно 30 минут после контакта со слюной. Чтобы дать материалу достаточно затвердеть, попросите пациента не подвергать пломбу давлению и трению в течение одного часа.
4. Обратите внимание, что CAVITON, смешанный с каким либо маслянистым веществом, таким, как эвгенол, не затвердеет.
5. При удалении пломбы остатки материала в полости очищаются с помощью небольшого ватного тампона, смоченного в спирте.
6. После использования баночку нужно немедленно закрыть, иначе CAVITON затвердеет под действием атмосферной влаги.

УПАКОВКА

Коробочка с баночкой 30 г пасты.

Цвета: белый и розовый.