

GC Fuji Varnish

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

Материал предназначен только для использования профессиональными стоматологами и только для целей, описанных в настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ

Для предотвращения попадания воды и слюны на открытые поверхности стеклоиономерных цементов в течение первых 24 х часов после нанесения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Лечение пациентов, у которых в прошлом наблюдались случаи аллергии на смолы, применяющиеся в стоматологии. В случае аллергии пациенты должны обратиться к врачу соответствующей специализации.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- а) Нанесите стеклоиономерный цемент в соответствии с инструкциями производителя.
- б) Используя ватный тампон или кисточку, нанесите GC Fuji VARNISH на все открытые поверхности стеклоиономерного цемента и на прилегающие поверхности.
- в) Просушите нанесенный лак, обдувая его несильной струей воздуха из водовоздушного пистолета.
- г) Не допускайте попадания влаги на покрытые препаратом поверхности еще в течение 2 - 3 минут.

Замечание:

GC Fuji VARNISH является летучим веществом. Закрывайте бутылочку немедленно после использования.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном темном месте (от +4 до +25 °С). Гарантируется срок годности 2 года.

РАСФАСОВКА

Бутылочка 10 г (10.4 мл).

ВНИМАНИЕ

GC Fuji VARNISH является ГОРЮЧИМ ВЕЩЕСТВОМ. Храните вдали от источников возгорания. Не храните в местах попадания прямых солнечных лучей.