

## **Freegenol Temporary Pack** БЕЗЭВГЕНОЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ ФИКСАЦИЙ

### **ПОКАЗАНИЯ**

Фиксация временных коронок и мостов

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Пациенты, у которых наблюдались аллергические реакции на цементы. В случае возникновения аллергических реакций направьте пациента к врачу соответствующего профиля.

### **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Выдавите на бумагу для замешивания полоски основы и катализатора одинаковой длины.
2. Тщательно замешайте их в течение 20-30 секунд.
3. Нанесите полученную пасту на внутренние поверхности (временной) коронки или моста, затем посадите коронку или мост на препарированный зуб. Поверхность зуба должна быть сухой.
4. После затвердевания (3 минуты от начала замешивания), удалите излишки материала.

### **ЗАМЕЧАНИЯ**

1. Время затвердевания можно изменять путем смешивания основы и катализатора в разных пропорциях (больше основы – затвердевает быстрее, меньше основы – медленнее). Обычно используются соотношения основа / катализатор в диапазоне от 3:2 до 2:3.
2. Если материал прилипает к зубу или металлу, можно добавить вазелин в количестве до 25% от общего объема смеси.

### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в прохладном темном месте (4-25 °C). Гарантируется срок годности 2 года.

### **РАСФАСОВКА**

Упаковка 1-1: 55 г основы, 20 г катализатора, очиститель и бумага для замешивания.

### **ВНИМАНИЕ**

В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.