



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБИН КОМПАНИИ BIEN-AIR

Обратитесь к инструкции по использованию средства для проведения комплексных процедур по уходу, очистке и стерилизации. Этот медицинский инструмент не является стерильным. Перед первым использованием выполните данную процедуру.

1 ПОДГОТОВКА



A. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

- Извлеките ротационный инструмент из зажима

B. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Наружная дезинфекция

⊘ Не погружайте инструмент в дезинфекционную ванну.

2 ОЧИСТКА



A. ОЧИСТИТЕ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ <38 °C

B. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

- Тщательно удалите жировые загрязнения и возможные отложения из спреевых каналов с помощью чистящей иглы
- Просушите спреевые каналы сжатым воздухом, а потом насухо вытрите весь инструмент тканью

⊘ Никогда не погружайте инструмент в ультразвуковую ванну



C. ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET


- Перед использованием встряхните средство Spraynet

- Используйте насадку Spraynet ①* (Для турбин с 2-3-х и 4-х канальным переходником см. текст в рамке ниже)

- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее впитывающей тканью, и нажмите на кнопку средства Spraynet на 1 секунду

- Очистите турбину снаружи тканью, смоченной средством Spraynet

ТОЛЬКО ДЛЯ ТУРБИН С 2-3-Х И 4-Х КАНАЛЬНЫМ ПЕРЕХОДНИКОМ

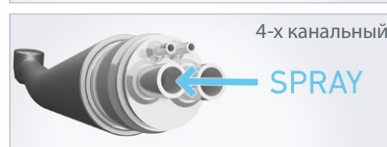

C'. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET ТОЛЬКО ДЛЯ ТУРБИН С 2-3-Х И 4-Х КАНАЛЬНЫМ ПЕРЕХОДНИКОМ

- Используйте насадку Spraynet ②*

- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее впитывающей тканью, и нажмите на кнопку средства Spraynet на 1 секунду

⚠ Распылите средство так, как указано на рисунках «2-3-х канальный переходник» и «4-х канальный переходник»

* См. полный список артикулов насадок на последней странице документа.

3 ДЕЗИНФЕКЦИЯ



A. ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (соблюдайте указания производителя по использованию средства)



⊘ Не погружайте инструмент в дезинфекционную ванну

ИЛИ

B. ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ (соблюдайте указания производителя по использованию средства)



4 СМАЗКА

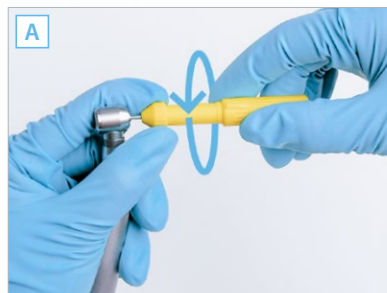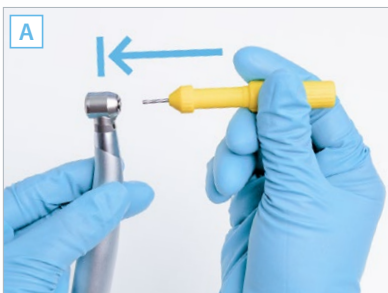

A. СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ LUBRIMED

ИЛИ

B. СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА LUBRIFLUID

- Перед использованием встряхните средство Lubrifluid
- Используйте насадку Lubrifluid ②, ③ или ④ в зависимости от типа инструмента* (Для турбин с 2-3-х и 4-х канальным переходником см. текст в рамке ниже)
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее впитывающей тканью, и нажмите на кнопку средства Lubrifluid на 1 секунду
- Затем проверьте работоспособность инструмента в течение 30 секунд низких оборотов, чтобы удалить возможные излишки смазочного средства
- Хранение сразу после смазки: поместите инструменты верхней частью вниз, чтобы остатки масла могли стечь



ТОЛЬКО ДЛЯ ТУРБИН С 2-3-Х И 4-Х КАНАЛЬНЫМ ПЕРЕХОДНИКОМ



B'. ВНУТРЕННЯЯ СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА LUBRIFLUID ТОЛЬКО ДЛЯ ТУРБИН С 2-3-Х И 4-Х КАНАЛЬНЫМ ПЕРЕХОДНИКОМ

- Используйте насадку Lubrifluid ②*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее впитывающей тканью, и нажмите на кнопку средства Lubrifluid на 1 секунду
- ⚠ Распылите средство так, как указано на рисунках «2-3-х канальный переходник» и «4-х канальный переходник»

5 СТЕРИЛИЗАЦИЯ



A. ПОМЕСТИТЕ ТУРБИНУ В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ПАКЕТ

B. СТЕРИЛИЗУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- Инструменты с символом можно стерилизовать в автоклаве

⚠ Стерилизуйте только очищенные и смазанные инструменты

* См. полный список артикулов насадок на последней странице документа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



SPRAYNET
чистящее средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600036-006



Bora L/LK, Boralina,
Prestige L/LK, Tornado L/LK



Black Pearl Eco, с 3-х и 4-х канальным
переходником



LUBRIFLUID
смазочное средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600064-006



Bora L/LK, Boralina,
Prestige L/LK, Tornado L/LK



Black Pearl Eco, с 3-х и 4-х канальным
переходником



Bora L, Boralina, Prestige L,
Tornado L, Boralina



Bora LK, Prestige LK, Tornado LK



AQUACARE
чистящее средство в виде
спрея, 500 мл
6 штук в упаковке
APT. 1600617-006



Bora L, Boralina,
Prestige L, Tornado L



Black Pearl Eco, с 3-х и 4-х канальным
переходником



Bora, Boralina, Prestige,
Tornado



LUBRICARE
Прибор для ухода за
инструментами
APT. 1600915-001



LUBRIMED
6 картриджей в упаковке
APT. 1600037-006



ЧИСТЯЩАЯ ИГЛА
10 штук в упаковке
APT. 1000001-010