

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

GC AROMA FINE DUST FREE

ДЖИ СИ АРОМА ФАЙН ДАСТ ФРИ

Альгинатный слепочный материал

Не содержащий примеси свинца и пыли альгинатный слепочный материал. Время отверждения в полости рта: нормальный (розовый) – 120 секунд; быстрый (зеленый) – 90 секунд.

Материал легко замешивается в соотношении 8,4 г / 20 мл воды.

Рабочее время 20 секунд от начала замешивания.

Материал обладает тиксотропическими свойствами (становится более текучим при легком надавливании),

свежим мятным вкусом, отличной адгезией к гидроколлоидам.

Гипсовая модель отливается сразу после снятия слепка.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	НОРМАЛЬНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ	БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ
СООТНОШЕНИЕ ПОРОШОК \ ЖИДКОСТЬ	8,4г / 20 мл воды	8,4г / 20 мл воды
Время замешивания (вручную)	30 секунд	20 секунд
Рабочее время	20 секунд	20 секунд
Время отверждения в полости рта	90 – 120 секунд	60 – 90 секунд
Отливка модели непосредственно после отверждения материала		